

LOGOSIL B

Kochfestes, hartes Laborsilikon

GEBRAUCHSANWEISUNG

LOGOSIL B ist für die extraorale Anwendung bestimmt, z.B. zur Herstellung von Schlüsseln (Repro-, Okklusions- und Funktionsschlüssel, Schlüssel für Klammerbefestigungen, Schlüssel für Zahnfleischmasken), Reparaturmodelle, Ausblockungen und Bisswälle.
Shore A Härte 95 +1- 3.

Material:

Kondensationsvernetzendes Silikon, das im wesentlichen aus organischen Derivaten und Dimethylpolysiloxan besteht. Farbe: blau.

Es wird mit Pasten-Katalysator geliefert.

Verarbeitung:

LOGOSIL B wird mit einem Meßlöffel dosiert, wobei der Überschuß abgestreift wird.

PASTENHÄRTER: Die dosierte Menge **LOGOSIL B** wird ausgebreitet. Pro verwendetem Meßlöffel **LOGOSIL B** den Löffelrand einmal eindrücken und Pastenhärter begeben.

Mischen:

Material falten und ca. 30 Sekunden kneten, bis eine homogene Mischung entstanden ist.

Aushärtezeit:

Bei Raumtemperatur ca. 5 Minuten. Durch Über- bzw. Unterdosierung des Härters kann die Härtung schneller bzw. langsamer erfolgen.

Lagerung:

Die garantierte Haltbarkeit beträgt, bei Lagerung zwischen 15-23°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit, 24 Monate.
Das Herstellungsdatum und die Lotnummer ist auf den Behältern ersichtlich.