

Die Verarbeitung des frikativen Geschiebes: PRECI-VERTIX P



1. Das Anbringen parallel zur Einschubrichtung



2. Der Neigungswinkel von 45° kann individuell angepasst werden. Die Patrize ist bis zu 3 mm reduzierbar.



3. Achten Sie auf die basale, passive Angleichung am Gingivaverlauf.



4. Zum Dubliervorgang werden immer die gelben Matrizen aufgesteckt und auf die Patrizenlänge gekürzt.



5. Die Verlängerung zum Modell (Ausblocken) wird mit Wachs vorgenommen.



6. So erhalten Sie ein perfektes Duplikatmodell.



7-8. Das PRECI-VERTIX-Geschiebe wird völlig durch Wachs (0,3 mm Stärke) umgeben.



9. Nach Einbringen der Kunststoffmatrize...



10. ...sollte sie an der vorgegebenen, nicht polierten Position sitzen bleiben.



11-12. Die fertiggestellte Prothese. Jetzt wird nur noch die Oberkante der Patrize leicht gekürzt und abgerundet.

